

Představujeme Vám plenkové kalhotky TENA Flex

Plenkové kalhotky **TENA Flex** s rychloupevňovacím pásem jsou určeny pro ženy i muže, kteří trpí středním až těžkým únikem moči. Jsou vhodné na den i noc, pro mobilní i nemobilní osoby.

Rychloupevňovací pás
– snadno se používá,
nyní navíc pruží

100% prodyšný
materiál je šetrný
k pokožce

FeelDry™
pro výjimečný pocit
sucha



Nyní nově s ComfiStretch™ Pružícím pásem po stranách



Kopíruje pohyby těla pro neustálé pohodlí

ComfiStretch™, „chytrá“ elastická část upevňovacího pásu, jemně pruží podle pohybů těla. Pružnost pásu je nejen do délky, ale i do všech ostatních směrů a kalhotky tak poskytují neustálé pohodlí.

TENA Flex a Vy

ComfiStretch™ přináší nové pohodlí a jistotu. **TENA Flex** Vám i nadále poskytují nejlepší možnou ochranu. Unikátní rychloupevňovací pás se snadno používá. Kalhotky jsou 100% prodyšné a tím pomáhají chránit Vaši pokožku. Rovněž poskytují pocit dokonalého sucha, tak abyste se cítili dobře.

Poslední inovací, kterou plenkové kalhotky **TENA Flex** nabízejí, je **ComfiStretch™**. Jedná se o „chytrou“ elastickou část upevňovacího pásu. Díky pružícím vlastnostem části **ComfiStretch™** upevňovací pás kopíruje pohyby těla a tak dochází k omezení nepříjemného tření nebo zařezávání pásu do kůže.

Kalhotky **TENA Flex** s **ComfiStretch™** zůstávají správně nasazený a tím zaručují dokonalou ochranu a pocit jistoty. Zároveň poskytují pohodlí po celý den.

TENA Flex Návod k nasazení



1 Umístěte pás okolo boků a zafixujte suchým zipem.



2 Protáhněte plenu mezi nohama, vytáhněte dopředu a rozprostřete nahoru na přední část pásu. Tím se vytvoří tvar misky.



3 Připevněte suché zipy z konce pleny na pás.

Plenkové kalhotky **TENA Flex** jsou určeny především pro osoby:

- chodící soběstačně i vyžadující asistenci
- nechodící soběstačně i vyžadující asistenci
- závislé